

Bruksanvisning

BESKRIVELSE: ASPIJECT® SIS er en selvspirerende sylinter ampullsprøyte for lokalbedøvelse.

KOMPATIBILITET: ASPIJECT® SIS benyttes med en standard dental kanyle og en standard cylinder ampull som medfølger:

REF	Kanylegjenge	Ampull
2085	M6	1,8 ml
2090	7/32"	1,8 ml

OBS! Benytt dentale kanyler med plastgjenger.
Unngå å bruk av metallt gjenger, da disse kan føre til opphopning av metallspen i gjengene.

TILTENKT BRUK: Et selvspirerende sterilt injeksjonssystem for infiltrasjon og nerveblokkade. Utviklet for bruk under sterile forhold.

BRUKERPROFIL: Brukes av tannleger som er opplært til å utføre lokale tanninjeksjoner.

INSTRUKSJONER: 1. Skru inn en standard kanyle. De ikke-sterile assistenten skrur på en vanlig nål mens den sterile kirurgen/assistenten holder i ampullkammeret, fig. 1.

2. Tilsett ampullen. Den sterile assistenten/kirurgen holder det sterile ampullkammeret, og den ikke-sterile assistenten setter inn en ikke-steril ampullen, fig. 2.

3. Skru ampullkammeret fast på det sterile fingergrepet. Den sterile kirurgen/assistenten skrur ampullkammeret på det sterile ASPIJECT® SIS-fingergrepet. Den ikke-sterile assistenten fjerner nåldekselet, fig. 3.

4. Aspirasjon oppnås ved å bruke et lett trykk på stempelet. Når ampullens elastiske membran spretter tilbake fra den lille spredningen på bunnen av ampullekammeret, opprettes et vakuum i ampullen, noe som sikrer aspirasjon, fig. 4.

RENGJØRING: Rengjør ASPIJECT® SIS fingergrepet i en dental desinfektor ved hjelp av et universelt program.

Rengjør sylindrampullen manuelt under vann fra springen og med et rengjøringsmiddel fra husholdningen. Skyll med vann. Unngå å rengjøre sylindrampullen i en dental desinfektor med desinfeksjonsmiddel.

OBS! Benytt aldri løsemidler til rengjøringsformål.

STERILISERING: ASPIJECT® SIS leveres usterilt og skal steriliseres før første gangs bruk. Steriliseres i autoklav ved 134 °C i minst 3 minutter. Fingergrepet og ampullkammeret demonteres under sterilisering (hvis sprøyten steriliseres sammenkoblet, kan spenninger forårsaket av termisk utvidelse av plastmaterialet føre til at beholderen brytes av i gjengene når sylindren skrues ut igjen).

AMPULLEKAMMER: ASPIJECT® SIS leveres med en ampullbeholder. Ytterligere beholdere kan kjøpes i pakker på 3.

OPPBEVARING: Oppbevares tørt, beskyttet mot rekontaminering.

AVHENDING: Kast ASPIJECT® SIS hvis instrumentet er skadet eller viser klare tegn på slitasje. Etter siste gangs bruk skal ASPIJECT® SIS i en resirkuleringsbeholder under rene forhold.

GARANTI: ASPIJECT® SIS dekkes av en 5-års garanti. Ampullkammeret dekkes ikke av garantien. Skader på grunn av utilstrekkelig forsiktighet eller feil håndtering dekkes ikke av garantien.

PRODUKTETS LEVETID: 5 år.