



Kalsiumhydroksid pulver

Kalsiumhydroksidpasta for midlertidig rotfylling

Sammensetning

100 % kalsiumhydroksid

Egenskaper

Når kalsiumhydroksidpulveret blandes med destillert vann, danner det en kremaktig pasta med en pH over 12.

Indikasjon

Midlertidig rotkanalbandasje for endodontisk behandling.

Bruksanvisning

Klargjør, rengjør og tørk kanalen grundig.

Bland kalsiumhydroksidpulveret med destillert vann til en kremet pasta.

Fyll kanalen med pastaen med en Lentulo-spiral eller lignende instrument. Unngå overtrengning av rotkanalsystemet for å unngå risikoen for apikal ekstusjon.

Hullet fylles med et midlertidig fyllmateriale for å sikre tetting mellom behandlingene og for å unngå forurensning av rotkanalsystemet.

Fjern pastaen helt ved neste avtale. Kalsiumhydroksidpastaen fjernes enkelt med en endodontisk fil og noen dråper saltvann.

Forholdsregler for bruk

Tilpass mengden pasta i apikale området til kanalens anatomiske form for å unngå fare for overløp.

Som en midlertidig rotfyllingsbandasje har pastaen en maksimal behandlingstid på 30 dager.

Kontraindikasjon

Ingen kjente eller forventede bivirkninger ved bruk som anvist.



Advarsel

Dette produktet er laget av kalsiumhydroksid, som er et hudirriterende middel som kan forårsake alvorlig øyeskade. Unngå kontakt med øyne, munnslimhinne og hud for å unngå mulig irritasjon eller skade. I samsvar med beste klinisk praksis anbefales det at pasienten bruker dam, vernebriller og vannrett smekke. Utøveren må bruke hansker, maske og vernebriller.

Ved kontakt med huden eller munnslimhinnen, fjern den umiddelbart fra vevet og skyll grundig med vann. Hvis det oppstår irritasjon på hud eller slimhinner, kontakt lege.

Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med mye vann i flere minutter mens øyelokket holdes åpent. Ring lege umiddelbart.

Ved svelging, skyll munnen med vann og drikk mye vann. Søk legehjelp. Hold den eksponerte personen i ro, ikke fremkall brekninger.

Oppbevaring

Oppbevares i romtemperatur mellom 5°C og 25°C, beskyttet mot lys.

Holdbarhet

5 år. Må ikke brukes hvis utløpsdatoen har passert.

Avhending

Kast det tomme glasset i henhold til lokale forskrifter.

Emballasjebeskrivelse

50g glass

REF

11025



For bruk av tannleger
Produsert i Sveits



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey
pd-dental.com . Switzerland