

COE® METALL AVTRYKKSSKJE -
NIKKELBELEGG

Kun til bruk av egnet tannhelsepersonell under anbefalte indikasjoner.
Les bruksanvisningen nøye før bruk.

ANBEFALTE INDIKASJONER

Til bruk med avtrykksmateriale for å ta tannavtrykk.

KONTRAINDIKASJONER

I sjeldne tilfeller kan produktet forårsake følsomhet hos noen mennesker.
Hvis du opplever slike reaksjoner, må du slutte å bruke produktet og henvise til lege.

FORHOLDSREGLER

1. Ikke bruk tørr varmesterilisering.
2. Bruk av ulike kjemiske desinfeksjonsmidler/sterilisatorer kan forårsake misfarging og/eller etsing av skjeen og anbefales derfor ikke.

3. En elektrolytisk reaksjon kan oppstå hvis skjeene plasseres i et flytende medium med forskjellige metaller, noe som forårsaker skade på nikkelbelegget.

BRUKSANVISNING

Håndtering

1. COE METALL AVTRYKKSSKJEER – NIKKEL BELEGG er messing med loddet kant og forniklet. Modifisering av skjeen bør være liten og forsiktig utført med fingertrykk. Ikke bruk tang. Overdreven manipulasjon vil spreke opp belegget.

Rengjøring

1. For å rengjøre en COE METALL AVTRYKKSSKJE – NIKKEL BELEGG, fjern mesteparten av avtrykksmaterialet fra skjeen.
2. Senk skjeen i en løsning av COE TRAY CLEANER og varmt vann i 15-30 min. Vanskelige partikler av alginat kan deretter fjernes ved lett børsting med en myk børste. COE TRAY CLEANER og varmt vann kan brukes for å fjerne voks og mikstur.

Sterilisering

1. COE METALL AVTRYKKSSKJE – NIKKEL BELEGG kan autoklaveres ved 250°F/121°C i 30 minutter. Skjeene skal oppbevares tørt.

OPPBEVARING

Oppbevar skjeene på et tørt sted.

PAKNING

Vanlig perforert – liten, middels, stor over og under

Vanlig solid – liten, middels, stor over og under

Barn & Ekstra Lang også tilgjengelig

Sist revidert: 06/2013