

LIFE CLEAN

INFORMASJONSBLAD DENTAL

Den ideelle løsningen

- High-level overflatedesinfeksjon
- Ikke nødvendig med re applisering
- Legger ikke igjen noen farlige biprodukter
- 0.5-5 minutter kontakttid
- Bred materialkapabilitet
- Bevist effektiv – verifisert av tredjepart

Organisme	Kontakttid	Standard
✓ Sporer	2-5 min	EN 17126
✓ Mycobakterier	1 min	EN 14563
✓ Virus	30 sek	EN 14476
✓ Murint norovirus	30 sek	EN 14476
✓ SARS-CoV-2	30 sek	EN 14476
✓ Fungicid/jäst	1 min	EN 13624
✓ Bakterier	1 min	EN 13727

For fullstendig liste se Microbiological Efficacy Summary.



Mer miljøtilpasset



- Ca 100 ganger lavere miljøpåvirkning (CO₂) i produksjonsleddet enn alkoholbasert desinfeksjon.
- Toksiologiske tester klassifiserer LifeClean som ikke-irriterende for hud og øyne, ikke kreftfremkallende, forårsaker ikke kromosomskader og passerer under grenseverdien for oral toksisitet.
- Klassifisert som sikker ifølge EG 1272/2008 (CLP).
- Biologisk nedbrytbare komponenter, akkumuleres ikke i naturen. Skaper ikke klorerende biprodukter.

Biofilm | Sporer | Virus | Sopp | Bakterier

For fullstendig liste se Microbiological Efficacy Summary.



LIFE CLEAN

INFORMASJONSBLAD DENTAL

Brukerveiledning overflater:

- 1 Kun for profesjonelt bruk. Følg alltid de lokale retningslinjene. Bruk hansker.
- 2 PPE bør brukes om nødvendig*.
- 3 Fjern synlig smuss.
- 4 Påfør en sjenerøs mengde løsning på kluten.
- 5 Gni nøye med kluten på flaten for å desinfisere.
- 6 La LifeClean virke for ønsket kontakt/påførings-tid.
- 7 Merk åpningsdatoen på etiketten. Lukk åpnet flaske.


Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

PPE*


Vi anbefaler bruk av egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon, og ved langvarig eksponering (Ref: sikkerhetsdatablad sek. 8.2.1.).



LifeClean-bad:

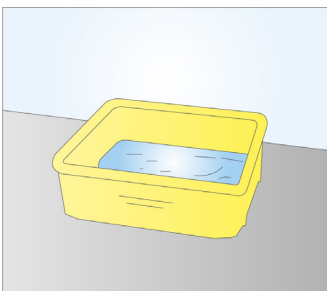


Fyll beholderen med ønsket mengde vann.

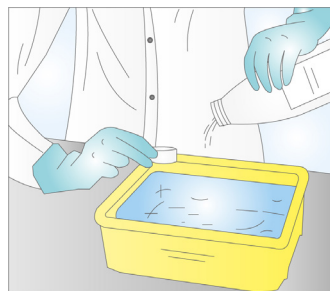

Tilsett ønsket mengde LifeClean.




Ta bort synlig smuss.

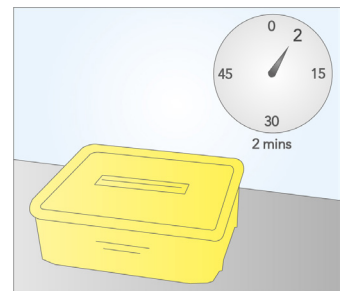

Legg objektet i beholderen. La virke under 2 minutter (virus/bakterier).



Etterskyl objektet. Følg lokale bestemmelser angående sterilt vann.

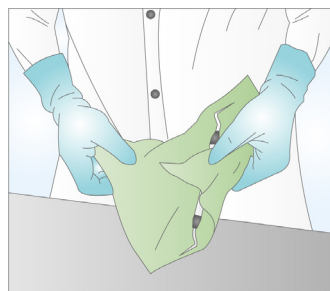

Tørk objektet nøye.

Ved utspedning:

Vi anbefaler tilpasset bruk av tilgjengelig åndedrettsvern ved utspedning. LifeClean er aktivi og med avdødende effekt så lenge væsken er gul/grønn. For vurdering av produktstyrke og ved utspedning kan følgende fargeindikator benyttes;

400 PPM

200 PPM

50 PPM

10 PPM

[————— High-level —————] [Intermediate-level] [Low-level]