

Vedlikehold

Brilliant Smiles munnskyll og tannkremer inneholder aktive ingredienser som løser opp overflatiske misfarginger og hindrer at nye misfarginger fester seg på tennene. Alle produkter inneholder 1450 PPM fluor,

mens ingen av produktene inneholder skadelig slিপemiddel. Derfor er munpleieserien perfekt å bruke til daglig for å bevare resultatet så lenge som mulig, samt for å bidra til god munnhelse.



Kontakt oss

Adresse: Backa Bergögata 16
422 46 Hisings Backa, Sverige
Telefon: +46 771 41 41 41
E-post: info@brilliant smile.se
Nettside: www.brilliant smile.com

B
BRILLIANT SMILE
SWEDEN



ALT DU VIL VITE OM
TANNBLEKING

B
BRILLIANT SMILE
SWEDEN

Tannbleking

Langt fra alle har naturlig hvite tenner. For mange av oss har hvitheten minsket på naturlig vis med årene, mens andre faktisk har mindre hvite tenner fra starten. Misfarginger er oftest et resultat av mat, drikke, tobakk og annet vi putter i munnen, der pigment presses inn i emaljen og gir tannen en mørkere farge over tid. God munnhigiene kan saktne prosessen, men når pigmentene allerede har blitt absorbert i tannen, er det bare tannbleking med hydrogenperoksid* som kan fjerne dem. Folk kan med de fleste typer misfarginger oppnå en hvitere nyans på tennene sine ved hjelp av Brilliant Smiles tannbleking. Bare én enkelt behandling er vanligvis nok til å oppnå merkbart hvitere tenner med resultater som varer i flere år.

Hva menes med Brilliant Smile-metoden?

«Brilliant Smile-metoden» er en rask og sikkert måte å bleke tenner på – ved hjelp av både Brilliant Smiles utstyr og framfor alt Brilliant Smiles tannblekingsgelé. Alle produktene våre er EU-godkjente

og pH-nøytrale, noe som betyr at du som kunde kan være helt trygg når du velger å bleke tennene med Brilliant Smile.

Sikker og effektiv behandling

Brilliant Smile er den ledende metoden i Sverige for tannbleking som gir gode resultater uten å gå på kompromiss med munnhelsen. Pasienter som gjennomgår en behandling med Brilliant Smile, trenger vanligvis ikke å få foretatt gjentatte behandlinger for å bli fornøyd. Ved tannbleking med andre metoder er bivirkninger som isninger og vedvarende sensibilitet svært vanlige. Heldigvis ses bivirkninger sjeldnere med Brilliant Smiles tannbleking, og hvis de forekommer, er de raskt forbigående og ufarlige. Den fremste årsaken til dette er at vi bare bruker pH-nøytral gelé (7) som dessuten inneholder tilsetningsstoffer som gjenoppbygger emaljen og minimerer bivirkninger. Ved lysbleking brukes preparatene våre i kombinasjon med velbalansert plasmalys, som er helt fritt for skadelige bølgelengder.

Hva er det som bleker tennene?

Hydrogenperoksid er den vanligste aktive ingrediensen i tannblekingspreparater. *Det finnes til og med stoffer som utsondrer hydrogenperoksid (f.eks. karbamidperoksid) som fungerer på liknende vis. Når hydrogenperoksid oksiderer, frigjøres frie oksygenradikaler som bryter ned organisk materiale til karbondioksid og vann. Misfargingene som sitter i tennene, er for eksempel rester fra kaffe, tobakk, mat osv. – organiske materialer som brytes ned. Emaljen er ikke organisk og påvirkes derfor ikke.

Er tannbleking farlig?

Brilliant Smiles tannbleking er helt ufarlig, men det samme gjelder dessverre ikke for alle tannblekingsmetoder. Hydrogenperoksid i seg selv bryter ned misfarginger i tannen uten å skade eller forandre tannens emalje, men det som derimot kan skade

emaljen, er preparater som ikke er pH-nøytrale, noe som tærer på emaljen. Tæringsskader er smertefulle, gir langvarig besvær og mindre holdbare blekingsresultater, derfor er alle Brilliant Smiles-preparater pH-nøytrale. Dessuten er plasmalysen vårt helt fritt for kreftfremkallende UV-stråler og skadelige bølgelengder.

Innen behandlingen

For å sikre at du er en god kandidat til bleking, skal en undersøkelse gjøres innen tannblekingsbehandlingen påbegynnes. De aller fleste er gode kandidater til bleking, men har man for eksempel hull, tannstein eller eventuelle skader, bør dette behandles først. Undersøkelsen gjennomføres ofte i forbindelse med tannblekingsbehandlingen eller maksimalt tre måneder før blekingen skjer.

Våre behandlinger

Vi tilbyr flere typer tannbleking, både til hjemmebruk og til behandling på klinikk. Som pasient er det opp til deg å bestemme hvilken type behandling du er mest bekvem med. Tannbleking på klinikk er perfekt til deg som vil se raske resultater uten at du trenger å gjøre noe selv. Naturligvis kan du oppnå samme resultat når du bleker tennene hjemme, men det tar litt lenger tid.

Tradisjonell klinikkbleking

- «Original-behandlingen» som utføres på klinikk
- Geléen finnes i ulike konsentrasjoner av hydrogenperoksid
- Aktivisering med Brilliant Smiles plasmalys
- Påbegynnes med grundig tannpuss
- Tannkjøttet beskyttes med protector
- Lysbehandlingen pågår i 3 x 7-20 min

Gjennomsnittresultat: 7 nyanser

Hjemmebleking

- Gel og skinne til tannbleking hjemme
- Kjøpes hos tannlegen
- Skinnen spesialtilpasses etter dine tenner
- Behandlingen pågår i 7 dager
- Ta vare på skinnen, og kjøp refill av geléen hos tannlegen

Gjennomsnittresultat: 7 nyanser etter 1 uke

re:fresh

- Enklere variant av bleking på klinikk
- Geléen inneholder 6 % hydrogenperoksid
- Geléen påføres i spesialdesignet skinne
- Aktivisering med Brilliant Smiles plasmalys
- Lysbehandlingen pågår i 2 x 20 min
- Ytterligere 20 min kan legges til mot ekstra avgift

Gjennomsnittresultat: 3-5 nyanser

Whitening strips

- Smidig tannbleking hjemme
- Transparente engangsstrips, den ene siden er dekt med hydrogenperoksidgelé (6 %)
- Fest direkte på tennene, fjern etter 1-2 timer
- Behandlingen pågår i opptil 14 dager

Gjennomsnittresultat: 7 nyanser etter 2 uker

Etter behandlingen

Der misfargingene tidligere har sittet, finnes det etter behandlingen mikroskopiske utthulinger som lett kan bli fylt med nye misfarginger. I løpet av de første 72 timene etter behandling er det derfor viktig å:

- Unngå sterkt fargede drikker, mat og tobakk da dette kan svekke resultatet.
- Unngå sure matvarer da disse kan forårsake overfølsomhet.
- Skyll med fluor to ganger daglig.

NanoSeal Total+

Ved tannbleking på klinikk finnes det et alternativ for dem som ikke vil unngå misfargende drikker osv. i henhold til instruksjonene ovenfor. De fleste klinikker

tilbyr mot en ekstra kostnad NanoSeal Total+, en beskyttende forsegling som påføres tennene etter bleking slik at man kan spise og drikke hva som helst rett etter behandlingen. NanoSeal Total+ gjenoppbygger straks emaljen og minimerer derfor også eventuelle isninger og sensibilitet.

Hvor lenge varer resultatet?

Misfarginger som har forsvunnet ved tannblekingen, er borte permanent, men det kommer derimot til å samle seg nye misfarginger. Hvor lang tid det tar for tennene å bli misfarget igjen, er veldig individuelt og avhenger av kost og livsstil. Vanligvis vil pasienter gjenta behandlingen etter 1-5 år.